

AUDAR®

User Manual

KERi



August International Ltd

Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.audarwatch.com

- EN** Smart Healthcare Wristband
- FR** Bracelet Connecté Santé
- DE** Intelligentes Armband für das Gesundheitswesen
- IT** Braccialeto Smart Healthcare
- ES** Pulsera Inteligente de Salud

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le Bracelet de Santé Connecté Audar KERi . Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes déjà familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le KERi par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autre réglementation en vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en terme de recyclage.

Déclaration de Conformité

La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lu sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Consignes de Sécurité

■ Utilisation et Rangement de l'Appareil

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
---	---	--	--

2. Caractéristiques Principales

- Podomètre compte-pas avec calcul de la distance et des calories
- Moniteur de fréquence cardiaque et de pression artérielle
- Analyse de la qualité du sommeil
- Affichage couleur et contrasté
- Notifications d'appels, SMS, messagerie et alarme vibrante

3. Contenu de la Boite



KERi



Câble de Recharge



Mode d'Emploi

4. Dénomination des Parties de Fonctions



1. Affichage couleur
2. Bouton tactile
3. Port de charge USB
4. Détecteur multifonction
5. Clip du bracelet

Guide de Démarrage Rapide

1. Scanner le QR code ci-dessous avec votre appareil ou chercher "AUDAR" sur Google Play ou App Store pour télécharger l'application.



Android 4.3 ou supérieur ou iOS 8.0 ou supérieur requis

2. Veuillez recharger l'appareil entièrement avant la première utilisation. Pour recharger l'appareil, tirer le côté du bracelet ayant la boucle afin de dévoiler le port de charge USB. Brancher le câble USB fourni au bracelet KERi et à un port USB alimenté. S'il ne charge pas, veuillez changer le câble de sens.

3. L'indicateur de batterie progressera. Une fois complet, une batterie pleine sera affichée. Veuillez vous assurer d'utiliser un chargeur 5V

2. Appuyer en maintenant le bouton tactile pendant 5 secondes pour allumer le KERi.

3. Veuillez-vous assurer que le bracelet se situe à moins de 10 mètres de l'appareil à connecter. Pour le connecter, lancer l'application « AUDAR » et appuyer sur « Connecter Bracelet ». S'assurer que les permissions soient autorisées ou accepter le système requis lorsque demandé.

4. Une fois connectée, entrer vos informations personnelles et appuyer sur "Suivant". Insérer vos objectifs journaliers (nombre de pas par jour) et appuyer sur « Sauvegarder » une fois terminé pour être redirigé vers la page d'accueil de l'application.

5. Le KERi est prêt à être utilisé.

Sommaire

1. Consignes de Sécurité	1
2. Caractéristiques Principaux	2
3. Contenu de la Boîte	2
4. Dénominations des Parties et Fonctions	2
5. Utilisation	5
5.1 Bracelet	5
5.1.1 Heure et Date (affichage par défaut)	5
5.1.2 Pas, Distance et Calories	6
5.1.3 Mode Sport	6
5.1.4 Mode Sommeil	7
5.1.5 Fréquence Cardiaque	7
5.1.6 Pression Artérielle	7
5.1.7 Taux d'oxygène dans le sang	8
5.1.8 Messages	8
5.1.9 Chronomètre	8
5.1.10 Trouver un Appareil	9
5.1.11 Information KERi	9
5.1.12 Éteindre le Bracelet	10
5.1.13 Luminosité	10
5.2 Application AUDAR	11
5.2.1 Connexion	11
5.2.2 Informations Personnelles	12
5.2.3 Page d'accueil	12
5.2.3.1 Prise de Mesure Manuelle	13
5.2.3.2 Compteur de Pas	13
5.2.3.3 Sommeil	14
5.2.3.4 Fréquence Cardiaque	15
5.2.3.5 Pression Artérielle	16
5.2.3.6 Taux d'oxygène dans le sang	17
5.2.3.7 Fatigue	18
5.2.4 Options	19
5.2.4.1 Informations personnelles	19
5.2.4.2 Rapport hebdomadaire	20
5.2.4.3 Activation Appareil Photo	20
5.2.4.4 Course	20
5.2.4.5 Paramètres de l'Appareil	21
5.2.4.6 Paramètres Généraux	23
5.2.4.7 À propos	23
5.2.4.8 Informations sur CareMate	23
6.Recharge	26
7.Dépannage	27
8.Détails Techniques	28
9.Garantie	29

5. Utilisation

5.1 Bracelet

Appuyer en maintenant le bouton tactile pendant 5 secondes pour allumer le KERi.

Pour éteindre le KERi :

1. Appuyer sur le bouton et sélectionner KERi off mode
2. Appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes
3. Appuyer sur le bouton pour sélectionner "Yes"
4. Appuyer sur le bouton tactile pendant 5 secondes afin de confirmer vouloir éteindre le bracelet

Appuyer sur le bouton pour activer l'écran. Une fois activé, ce dernier s'éteindra automatiquement après 5 secondes. Lorsque l'affichage est activé, appuyer sur le bouton tactile pour naviguer entre les différents modes : Heure et Date (Affichage par défaut), Pas, Distance parcourue, Calories, Mode Sport, Mode sommeil, Fréquence Cardiaque, Pression Artérielle, Taux d'oxygène, Messages, Chronomètre, Trouver un appareil, Informations KERi, Éteindre, luminosité.

Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale

5.1.1 Heure et Date (Affichage par défaut)



- Statut de la connexion Bluetooth
(Affiché lorsque connecté) Niveau de la batterie
- Heure
- Date (JJ/MM)
- Jour
- Pas



Affichage 1



Affichage 2

L'heure et la date se mettent à jour automatiquement dès que le bracelet KERi est connecté à un appareil. Appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes pour changer d'affichage.

5.1.2 Pas, Distance et Calories



Nombre de pas effectué

Distance

Calories

Le KERi affiche le nombre de pas effectué depuis le début de la journée. Afin d'avoir des données les plus précises, il est recommandé d'indiquer vos informations précises (Se référer à la section 5.2.2)

Le KERi calcule la distance parcourue en fonction du nombre de pas effectué. Pour plus de précision, il est recommandé de renseigner vos détails personnels de la façon la plus précise possible. (Se référer à la section 5.2.2)

Le KERi calcule les calories brûlées en fonction du nombre de pas effectué et de la distance parcourue.

5.1.3 Mode Sport



Mode Sport



Course



Vélo



Randonnée

Appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes pour activer le mode sport. Appuyer ensuite sur le bouton pour sélectionner le mode sport souhaité : Course, Vélo, Randonnée ou Retour. Dans Retour, appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour retourner à l'écran d'accueil. Après avoir choisi le sport souhaité, appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour activer le mode sélectionné. Pendant la séance de sport, appuyer sur le bouton pour démarrer ou mettre en pause le compteur. Après la séance de sport, mettre le compteur en pause et appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour retourner au menu principal.

5.1.4 Mode sommeil



Information du sommeil

Lorsque le mode sommeil est sélectionné, le KERi affiche les informations à propos de votre sommeil.

5.1.5 Fréquence Cardiaque



Fréquence cardiaque

Lorsque le mode Fréquence Cardiaque est sélectionné, le KERi commence à mesurer votre fréquence cardiaque. Cela prend jusqu'à 1 minute. Une fois la mesure prise, le KERi vibrera et affichera votre fréquence cardiaque en Battement Par Minute (BPM).


5.1.6 Pression Artérielle



Pression systolique (Pression artérielle maximale)
Pression diastolique (Pression artérielle minimale)

Lorsque le mode Pression Artérielle est sélectionné, le KERi commence à mesurer votre Pression Artérielle systolique et diastolique. Cela peut prendre une minute. Une fois la mesure prise, le KERi vibrera et affichera les valeurs constatées.

5.1.7 Taux d'oxygène dans le sang

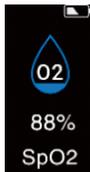

Taux d'oxygène dans le sang

Lorsque le mode taux d'Oxygène dans le sang est sélectionné, le KERi commence à mesurer votre Taux d'oxygène dans le sang. Cela peut prendre une minute. Une fois la mesure prise, le KERi affichera le taux constaté.

5.1.8 Messages



Lorsque le mode Messages est sélectionné, le KERi affiche les messages reçus sur le téléphone connecté. Appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes pour que le KERi affiche les détails des messages. Appuyer sur le bouton pour changer de message.

5.1.9 Chronomètre



Minutes

Secondes


Millisecondes

Appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes pour démarrer le chronomètre. Appuyer sur le bouton pour le mettre en pause ou reprendre le décompte.

Lorsque le chronomètre est en pause, appuyer et maintenir le bouton pour retourner au menu principal.

Remarque : Le temps maximum du chronomètre est de 99 minutes (1h et 39 minutes). Une fois cette durée atteinte, le chronomètre recommencera à zéro 00:00:00.

5.1.10 Trouver un Appareil

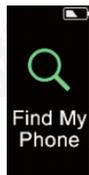

Trouver mon téléphone

Appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction Trouver un Appareil. L'appareil connecté au bracelet se mettra à sonner ou vibrer selon les paramètres. Il sera ainsi localisable.

Remarque : L'appareil connecté doit être dans un rayon de 10 mètres. Si vous ne l'entendez pas, essayer de changer de lieu et recommencez.

5.1.11 Informations KERi



Information MAC KERi

Les informations KERi donnent accès à un identifiant unique pour le bracelet. Cela est utile pour connecter l'appareil lorsqu'il y a d'autres KERi à proximité.

5.1.12 Éteindre



Éteindre

Pour éteindre le KERi :

- 1.Appuyer sur le bouton et sélectionner KERi off mode
- 2.Appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes
- 3.Appuyer sur le bouton pour sélectionner "Yes"
- 4.Appuyer sur le bouton tactile pendant 5 secondes afin de confirmer vouloir éteindre le bracelet

5.1.13 Luminosité



Luminosité



4 niveau de luminosité

Pour active le mode Luminosité, appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes en sélectionnant la fonction. Il y a quatre niveaux de luminosité. Appuyer sur le bouton pour les faire évoluer. Après avoir choisi la luminosité adéquate, appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes pour sauvegarder et retourner au menu principal.

Remarque : Lorsque le KERi est utilisé au soleil, il est recommandé de mettre la luminosité au niveau maximum.

5.2 Application AUDAR

Scanner le QR code ci-dessous avec votre appareil ou chercher "AUDAR" sur Google Play ou App Store pour télécharger l'application.




Android 4.3 ou supérieur ou iOS 8.0 ou supérieur requis.

5.2.1 Connection

1. Activer le Bluetooth sur votre appareil et s'assurer qu'il se trouve à moins de 10m du KERi.
2. Lancer l'application "AUDAR" et sélectionner "Connecter Bracelet".
3. Sélectionner KERi dans la liste des appareils.
4. Si plusieurs KERi se trouvent à proximité, vérifier les informations du bracelet afin de sélectionner le bon (Voir section 5.1.11)
5. Une fois connecté, l'icône Bluetooth apparaît sur l'écran du KERi


Remarque : Pour les appareils Android, s'assurer que les permissions soient accordées à l'application AUDAR. Pour les appareils iOS, confirmer les informations requises du Bluetooth.

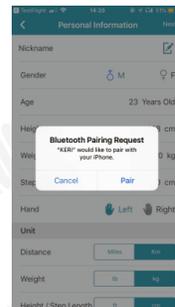

5.2.2 Informations Personnelles

Une fois le KERI connecté, renseigner vos informations personnelles et appuyer sur "Suivant". Indiquer les objectifs journalier (nombre de pas à effectuer chaque jours) et appuyer sur « Sauvegarder » pour retourner à la page d'accueil.

Les informations personnelles peuvent être modifiées à tout moment. (Voir section 5.2.4.1)

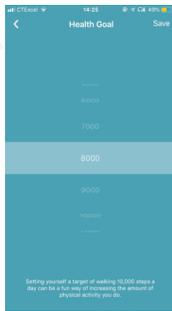

5.2.3 Page d'accueil

La page d'accueil permet d'afficher toutes les données sur un écran, tel le nombre de pas effectué, la distance parcourue, la durée du sommeil ainsi que les données des dernières mesures de la fréquence cardiaque, pression artérielle, taux d'oxygène dans le sang et l'état de fatigue.




Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

5.2.3.1 Prise de Mesure Manuelle

La fonction de prise de mesure manuelle permet d'effectuer une mesure ponctuelle de la fréquence cardiaque, pression artérielle, taux d'oxygène dans le sang et de l'état de fatigue.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale. L'état de fatigue est calculé par un algorithme mathématique et base sur les données des autres prises de mesures.

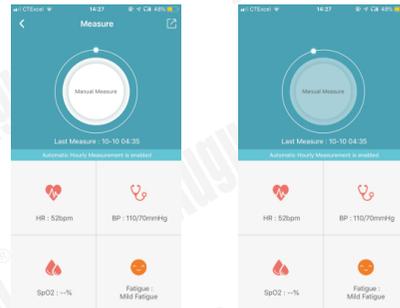


1. Appuyer sur "Mesurer" en haut à droite de la page d'accueil pour ouvrir l'écran de prise de mesure.
2. Appuyer sur "Mesure Manuelle" pour lancer une prise de mesure
3. Une fois la prise de mesure terminée, les données s'affichent à l'écran. Appuyer sur chacune des données pour afficher les détails.

5.2.3.2 Compteur de Pas

Le nombre de pas effectué s'affiche sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

- Faire glisser la date vers la droite pour afficher les données des jours précédents.
- Appuyer sur une des barres du graphique pour afficher le nombre exact de pas effectué.
- Sous le graphique se trouvent les informations supplémentaires telles nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et progression par rapport à l'objectif du jour.
- Appuyer sur "Notes" pour changer l'objectif journalier (le nombre de pas à effectuer par jour).
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage de données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.

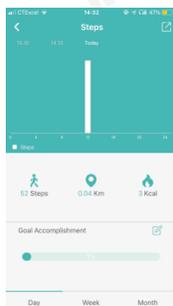

5.2.3.3 Sommeil

Les données les plus récentes relatives au sommeil s'affichent sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

- Faire glisser la date vers la droite pour afficher les données des jours précédents
- Appuyer sur une des barres du graphique pour afficher la durée exacte du sommeil le jour concerné.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données.



5.2.3.4 Fréquence Cardiaque

Les données les plus récentes relatives à votre fréquence cardiaque sont affichées sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails, voir l'historique ou effectuer une prise de données en temps réel.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

- La mesure la plus récente est affichée dans la partie supérieure de l'écran.
- Appuyer sur "Mesure unique" pour prendre une nouvelle mesure.
- Appuyer sur "Mesure en temps réel" pour afficher votre fréquence cardiaque en temps réel. Appuyer à nouveau sur « Mesure en temps réel » pour désactiver la fonction. Remarque : La fonction de mesure en temps réel doit être fermée pour retourner sur la page d'accueil.
- L'historique des données est affiché en dessous du graphique. Faites glisser l'écran vers le haut pour afficher les données.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données. Faire glisser la date vers la droite pour afficher l'historique des données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.



5.2.3.5 Pression Artérielle

Les données les plus récentes relatives à la pression artérielle sont affichées sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails, voir l'historique ou effectuer une prise de mesure en temps réel.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

- La mesure la plus récente s'affiche sur la partie supérieure de l'écran.
- Appuyer sur "Mesure unique" pour effectuer une prise de mesure.
- Appuyer sur "Mesure en temps réel" pour afficher votre pression artérielle en temps réelle. Appuyer à nouveau sur « Mesure en temps réel » pour désactiver la fonction. Remarque la fonction de mesure en temps réel doit être désactivée pour retourner sur la page d'accueil.
- L'historique des données est affiché en dessous du graphique. Faites le glissement vers le haut pour afficher les données.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données. Faire glisser la date vers la droite pour afficher l'historique des données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.



5.2.3.6 Taux d'oxygène dans le sang

Les données les plus récentes relatives à votre taux d'oxygène dans le sang sont affichées sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails, voir l'historique ou effectuer une prise de mesure en temps réel.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.



- La mesure la plus récente s'affiche sur la partie supérieure de l'écran.
- Appuyer sur "Mesure unique" pour effectuer une prise de mesure.
- Appuyer sur "Mesure en temps réel" pour afficher votre taux d'oxygène dans le sang en temps réelle. Appuyer à nouveau sur « Mesure en temps réel » pour désactiver la fonction. Remarque la fonction de mesure en temps réel doit être désactivée pour retourner sur la page d'accueil.
- L'historique des données est affiché en dessous du graphique. Faites le glissement vers le haut pour afficher les données.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données. Faire glisser la date vers la droite pour afficher l'historique des données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.



5.2.3.7 Fatigue


L'état de fatigue s'affiche sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails, l'historique ou effectuer une prise de données en temps réel.

- La mesure la plus récente s'affiche sur la partie supérieure de l'écran.
- Appuyer sur "Mesure unique" pour effectuer une prise de mesure.
- L'historique des données est affiché en dessous du graphique. Faire le glisser vers le haut pour afficher les données.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données. Faire glisser la date vers la droite pour afficher l'historique des données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.

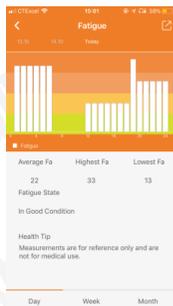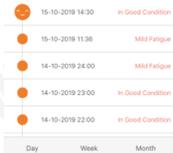

5.2.4 Options

Appuyer sur < ≡ > pour afficher le menu des options du bracelet. Appuyer sur l'une des options pour y entrer.

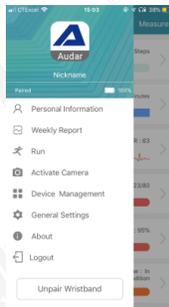

5.2.4.1 Informations Personnelles

Vous pouvez mettre à jour vos informations personnelles dans cette section :

- Sexe
- Age
- Taille
- Poids
- Foulée
- Main de portée
- Unité de mesure de distance, taille, poids
- Paramètres du sommeil
- Valeur pression artérielle

Une fois terminé, appuyer sur sauvegarder pour revenir à l'écran d'accueil.



5.2.4.2 Rapport hebdomadaire

Le rapport hebdomadaire permet de visionner les données de la semaine et de celles passées.



5.2.4.3 Activer l'appareil photo

Cette fonction permet d'activer l'appareil photo de votre téléphone et d'utiliser le KERi comme télécommande e l'appareil.

- 1.Appuyer sur "Activation Appareil Photo"
- 2.Une fois l'appareil photo active, secouer le KERi pour prendre une photo.
- 3.Appuyer sur "Annuler" pour retourner à la page d'accueil




5.2.4.4 Course

Cette fonction permet de suivre et localiser votre course.

Appuyer sur "Durée de course cumulée" pour voir l'historique de course.

Appuyer sur "Commencer" pour démarrer la prise de données

- Appuyer sur <  > pour changer l'affichage entre Normal et Carte.
- Appuyer et maintenir le bouton jaune pour metre en pause
- Lors de la pause, appuyer sur le bouton vert pour reprendre la prise de données.
- Appuyer sur le bouton rouge pour finir la course.

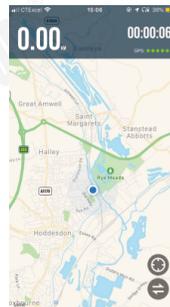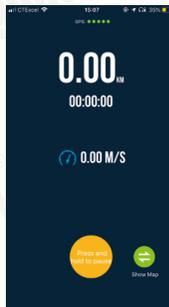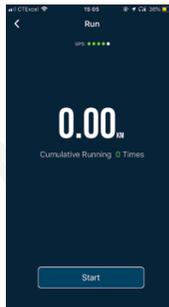

5.2.4.5 Paramètres de l'appareil

Cet écran permet d'afficher le niveau de batterie restant du KERi ainsi que les options suivantes :

- Gérer la connexion
 - Afficher le statut de la connexion
 - Connecter ou déconnecter le bracelet
- Rechercher bracelet
 - Appuyer sur "Rechercher Bracelet" pour faire vibrer le bracelet et le localiser. Remarque : Cette option ne fonctionne que si le bracelet se trouve à moins de 10m (distance Bluetooth).
- Mémos (Permet de programmer des alarmes silencieuses vibrantes sur le bracelet)
 - Notifications d'appel : <  > sera affiché à l'écran dès qu'un appel entrant survient sur le téléphone connecté.
 - Notification de Messages : <  > dès qu'un message survient sur le téléphone connecté.
 - Réveil : Le bracelet vibrera à l'heure choisie et <  > sera affiché à l'écran. 8 réveils peuvent être créés.
 - Notification sédentaire : Lorsque cette option est active, le bracelet vibrera et <  > sera affiché à l'écran si aucune activité n'est détecté pendant 45 minutes consecutives.
 - Notifications d'applications : Cette fonction permet d'activer ou désactiver les notifications d'applications tierces, tels que Facebook, Twitter, WhatsApp etc...
 - Ne pas déranger : Cette option permet de désactiver toutes les notifications pendant une certaine période donnée (la nuit par exemple).
- Activation automatique de l'écran : Lorsque cette fonction est active, l'écran s'allume automatiquement dès que le poignet est tourné.
- Mesure automatique chaque heure : Lorsque cette option est active une prise de mesure est effectuée automatiquement chaque heure de la journée. Nous recommandons d'activer cette fonction afin d'avoir les données les plus précises.
- Mise à jour micro-logiciel : Cette page affichera la version de votre bracelet et permettra de mettre à jour le logiciel si une nouvelle version est disponible.
- 12 / 24h : Changer l'affichage au format 12h ou 24h



5.2.4.6 Paramètres généraux

- Informations personnelles : Se référer à la section 5.2.4.1.
- Objectif santé : Permet de modifier le nombre de pas à effectuer par jour.
- Application tierce :
 - Apple Health (Appareils Apple uniquement)
 - Google Fit (Appareils Android uniquement)
- Remettre aux paramètres d'usine : Toutes informations contenues dans le bracelet seront effacées.
- Effacer les données permet d'effacer toutes données sur le bracelet ou l'application, ou les deux.

5.2.4.7 A propos


The About section displays the version number of the application and allows you to access the Help feature. Cette section indique la version de l'application et permet l'accès à la section Aide.

Depuis la section Aide, il est possible de :

- Nous envoyer un commentaire à propos de votre bracelet, de l'application AUDAR, ou déclarer un bug.
- Voir la liste des questions fréquentes (appuyer sur l'une des questions pour afficher la réponse).

6.2.4.8 Informations sur CareMate

S'abonner aux données d'exercice et de santé de quelqu'un Une demande pour devenir un CareMate peut être soumise en recherchant le numéro de téléphone mobile ou l'adresse électronique utilisés pour s'inscrire à compte AUDAR.

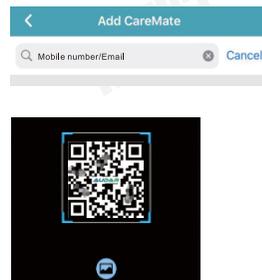


Une fois la demande approuvée, vous pouvez cliquer sur « Mon Gardien » en haut et à droite pour afficher la liste des utilisateurs que vous suivez et surveiller leurs données d'exercice et de santé en temps réel.



De plus, une demande de suivi peut être soumise en scannant le code QR d'un autre utilisateur. Les informations sur le code QR sont situées dans le menu déroulant en haut et à droite.

Demande CareMate


Vous pouvez approuver ou rejeter toute demande de CareMate en cliquant sur « Mon Gardien » dans le menu déroulant situé en haut et à droite.

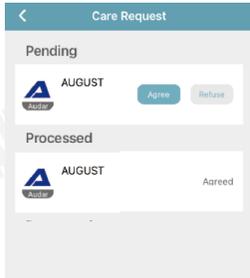

• Mon Gardien




En cliquant sur « Mon Gardien » dans le menu déroulant en haut et à droite, vous pouvez accéder à une liste complète de tous les gardiens qui vous ont suivi.

La visibilité de chaque donnée de santé pour votre gardien peut être modifiée à tout moment après avoir cliqué sur le gardien individuel dans la liste.

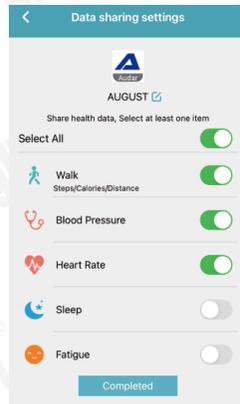

6. Recharge

Pour recharger l'appareil, décrocher le bracelet ayant la boucle. Cette opération révélera la prise de recharge USB du bracelet. Connecter la prise de recharge USB à un port USB alimenté directement ou en utilisant le câble rallonge fourni. Si le bracelet ne semble pas charger, brancher le dans l'autre sens.

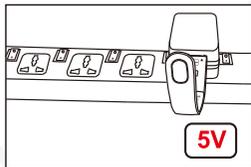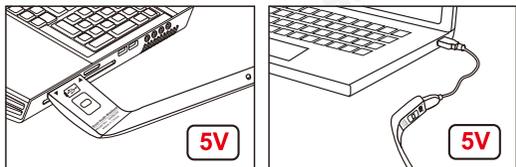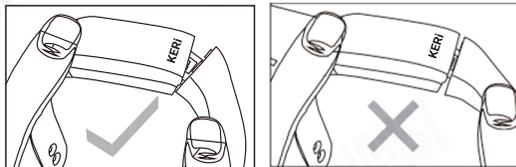

L'icône de la batterie se remplira lors de la charge. Lorsque la recharge est complète l'icône sera pleine. S'assurer que la tension de sortie est de 5V.

7. Dépannage

Problèmes	Solutions
Le bracelet ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">■ Recharger le KERi■ Appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes
Le bracelet ne se charge pas	<ul style="list-style-type: none">■ Insérer le KERi dans un port USB alimenté et vérifier le sens d'insertion■ Utiliser le câble rallonge fourni pour connecter le KERi au port USB alimenté
Le bracelet ne se connecte pas	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifier que le Bluetooth soit active sur votre appareil■ Vérifier que le KERi se trouve à moins de 10m de votre appareil■ Vérifier que l'adresse MAC du KERi est la même que celle affichée dans l'application■ S'assurer que toutes les autorisations requises soient autorisées.
Pas de données affichées dans l'application	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifier que le KERi soit connecté à votre appareil■ Activer la prise de mesure automatique dans les paramètres du dispositif
Les notifications ne s'affichent pas	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifier que le KERi soit à proximité de votre appareil et que le Bluetooth soit activé■ Vérifier les paramètres des mémos dans l'application

8. Détails Techniques

Écran OLED	0,96 pouces; 160x80pixels
Puce	Nordic NRF51832
Version Bluetooth	v4.2BLE
Capteur Fréquence Cardiaque	PixArt PAH8001
Type de Batterie	Li-polymère de 180mAh
Autonomie	15Jours
Autonomie en Veille	Jusqu'à 20 jours
Durée d'une Recharge	2 Heures env.
Matériel Bracelet	TPU
Indice de Protection	IP67
Poids Net	30g
Dimensions	258 x 22 x 13.8mm

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.

